



Kit DiaPanel: 45241.01.1

LOT 16211.01.1 - 16311.01.1

2025.07.07

DiaPanel

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos
Identificação de anticorpos / Antibody identification / Identificación de anticuerpos

IVD

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable	Doador Donor Donante	Rh-hr							Kell						Duffy		Kidd	Lewis	P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Método / Method / Método							
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b										
1	CCC ^W D.ee	R ₁ ^W R ₁	25251797	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	nt	nt	+	+	+	+	0	+	+	+	+	0	0	+	0	+	0		1						
2	CCD.ee	R ₁ R ₁	25251697	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	0	+	0		2							
3	ccD.EE	R ₂ R ₂	25007234	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	0	+	0		3							
4	Ccddee	r´r	45065	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	+	+	0	0	+	+	+	0	+	+	0	+	+		4							
5	ccddEe	rˉr	25007312	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0		5								
6	ccddee	rr	191405	0	0	0	+	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0		6							
7	ccddee	rr	25007774	0	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	+	0	+	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0		7							
8	ccD.ee	R ₀ r	25008450	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0		8							
9	ccddee	rr	25008911	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0		9							
10	ccddee	rr	25007688	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	0	0	+	+	+	+	0	+	0		10							
11	ccD.ee	R ₀ r	25011583	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	0		11							
Paciente / Patient / Paciente																														Autocontrole Autocontrol Autocontrol								

Ver observações no verso / Remarks see overleaf / Ver observaciones en el reverso

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha

As hemácias-teste **1-11 do DiaPanel** (exceto as indicadas como “antígenos especiais”) são:

	positivo (+)	negativo (0)
--	--------------	--------------

DiaPanel cells 1–11 (except as indicated under “special types”) are:

Las células **1-11 de DiaPanel** (excepto cuando se indica lo contrario en la columna “Tipos especiales”) son:

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.

Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.

Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.

Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte

w = fraco / weak / débil

nt = não testado / not tested / no probado