



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

ID-DiaCell I, II

Tabela de antígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

IVD

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genotipo probable	Doador Donor Donante	Rh-hr						Kell						Duffy		Kidd	Lewis		P	MNS				Luth.		Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales		Resultado / Result / Resultado			
				D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P _i	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b			Di ^a	LISS/ Coombs	Enzima Enzyme Enzima	4 °C
I	CCD.ee	R ₁ R ₁	168156	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0		I			
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	25013300	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+		II			
																										Autocontrole Autocontrol Autocontrol								

Resultado / Result / Resultado		
LISS/ Coombs	Enzima Enzyme Enzima	4 °C

Os antígenos marcados com um * indicam aqueles antígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.
Los antígenos marcados con * indican antígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os antígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.
Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Las columnas sombreadas indican los antígenos destruídos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

s = forte / strong / fuerte
w = fraco / weak / débil
nt = não testado / not tested / no probado

LOT I 06111.33.1
II 06121.33.1
Kit I, II 45151.33.1
🕒 2025.09.01

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo + antígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo + antígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha

