

IH-QC Modular System

IH-QC1, IH-QC2, IH-QC3, IH-QC4, IH-QC5, IH-QC6, IH-QC7, IH-QC8

Tabela 1: Resultados esperados para ABO, RhD, Rh/K, Pesquisa / Identificação de Anticorpos, Teste da Antiglobulina Direto (TAD)
 Table 1: Expected results for ABO, RhD, Rh/K, Antibody Screening / Identification, Direct Antiglobulin Test (DAT)

IH-QC tubos IH-QC tubes	Prova direta ABO ABO forward grouping			Prova reversa ABO ABO reverse grouping				RhD		Rh/K						Pesquisa / Identificação de Anticorpos Antibody Screening / Identification		TAD DAT	
	A	B	AB	A ₁	A ₂	B	O	RhD	D TAI / IAT	C	c	E	e	C ^w	K	TAI / IAT	Papaína em 2 estágios Papain 2 stage	IgG	C3b (c/d)
IH-QC1	Pos	Neg	Pos	Neg	Neg	Pos	Neg	Neg		Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Anti-D	Anti-D	Neg	Neg
IH-QC2	Neg	Pos	Pos	Pos	Pos	Neg	Neg	Pos		Pos	Pos	Pos	Pos	Neg	Neg	Anti-Fy ^a	Neg	Neg	Neg
IH-QC3	Pos	Pos	Pos	Neg	Neg	Neg	Neg	Pos		Pos	Neg	Neg	Pos	Neg	Neg	Anti-c	Anti-c	Neg	Neg
IH-QC4	Neg	Neg	Neg	Pos	Pos	Pos	Neg	Pos		Neg	Pos	Pos	Neg	Neg	Neg	Anti-K		Neg	Neg
IH-QC5	Pos	Neg	Pos	Neg	Neg	Pos	Neg	Pos		Pos	Pos	Neg	Pos	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
IH-QC6								Pos	Pos									Neg	Neg
IH-QC7																		Pos	Neg
IH-QC8																		Neg	Pos

Resultados esperados para ABO, RhD, Rh/K, Pesquisa / Identificação de Anticorpos, Teste da Antiglobulina Direto (TAD)
 Expected results for ABO, RhD, Rh/K, Antibody Screening / Identification, Direct Antiglobulin Test (DAT)
 Resultados esperados ABO, RhD, Rh/K, Escrutínio de anticuerpos/Identificación, prueba de antiglobulina directa (CD)

Tubos IH-QC
IH-QC tubes

Prova direta ABO
ABO forward grouping
ABO hemático

Prova reversa ABO
ABO reverse grouping
ABO sérico

Teste da Antiglobulina Indireto (TAI)
Indirect Antiglobulin Test (IAT)
Prueba de antiglobulina indirecta (IAT)

Papaína em 2 estágios
Papain 2 stage
Papaína de 2 fases

Tabela 2: Resultados esperados para o Teste da Antiglobulina Indireto (TAI) para provas cruzadas ABO compatíveis
 Table 2: Expected results in Indirect Antiglobulin Test (IAT) for ABO compatible crossmatches

PLASMA	HEMÁCIAS CELLS			
	IH-QC1	IH-QC2	IH-QC4	IH-QC5
IH-QC1			Pos (incompatível) Pos (incompatible)	Pos (incompatível) Pos (incompatible)
IH-QC3	Pos (incompatível) Pos (incompatible)	Pos (incompatível) Pos (incompatible)	Pos (incompatível) Pos (incompatible)	Pos (incompatível) Pos (incompatible)
IH-QC5	Neg (compatível) Neg (compatible)		Neg (compatível) Neg (compatible)	

Resultados esperados para o Teste da Antiglobulina Indireto (TAI) para provas cruzadas ABO compatíveis
 Expected results in Indirect Antiglobulin Test (IAT) for ABO compatible crossmatches
 Resultados en la prueba de antiglobulina indirecta (IAT) para pruebas cruzadas ABO compatible

Hemácias
Cells
Hematies

Incompatível
Incompatible
Incompatible

Compatível
Compatible
Compatible

IH-QC Modular System

IH-QC1, IH-QC2, IH-QC3, IH-QC4, IH-QC5, IH-QC6, IH-QC7, IH-QC8

Tabela 3: Resultados para ABO, RhD, Rh/K, Pesquisa / Identificação de Anticorpos, Teste da Antiglobulina Direto (TAD)
 Table 3: Expected for ABO, RhD, Rh/K, Antibody Screening / Identification, Direct Antiglobulin Test (DAT)

IH-QC tubos IH-QC tubes	Prova direta ABO ABO forward grouping			Prova reversa ABO ABO reverse grouping				RhD		Rh/K						Pesquisa / Identificação de Anticorpos Antibody Screening / Identification		TAD DAT	
	A	B	AB	A ₁	A ₂	B	O	RhD	D TAI / IAT	C	c	E	e	C ^w	K	TAI / IAT	Papaína em 2 estágios Papain 2 stage	IgG	C3b (c/d)
IH-QC1																			
IH-QC2																			
IH-QC3																			
IH-QC4																			
IH-QC5																			
IH-QC6																			
IH-QC7																			
IH-QC8																			

Resultados para ABO, RhD, Rh/K, Pesquisa / Identificação de Anticorpos, Teste da Antiglobulina Direto (TAD)
 Results for ABO, RhD, Rh/K, Antibody Screening / Identification, Direct Antiglobulin Test (DAT)
 Resultados ABO, RhD, Rh/K, Escrutínio de anticuerpos/Identificación, prueba de antiglobulina directa (CD)

Tubos IH-QC
IH-QC tubes

Prova direta ABO
ABO forward grouping
ABO hemático

Prova reversa ABO
ABO reverse grouping
ABO sérico

Teste da Antiglobulina Indireto (TAI)
Indirect Antiglobulin Test (IAT)
Prueba de antiglobulina indirecta (IAT)

Papaína em 2 estágios
Papain 2 stage
Papaína de 2 fases

Tabela 4: Resultados para o Teste da Antiglobulina Indireto (TAI) para provas cruzadas ABO compatíveis
 Table 4: Results in Indirect Antiglobulin Test (IAT) for ABO compatible crossmatches

PLASMA	HEMÁCIAS CELLS			
	IH-QC1	IH-QC2	IH-QC4	IH-QC5
IH-QC1				
IH-QC3				
IH-QC5				

Resultados para o Teste da Antiglobulina Indireto (TAI) para provas cruzadas ABO compatíveis
 Results in Indirect Antiglobulin Test (IAT) for ABO compatible crossmatches
 Resultados de antiglobulina indirecta (IAT) para pruebas cruzadas ABO compatible

Hemácias
Cells
Hematies

Incompatível
Incompatible
Incompatible

Compatível
Compatible
Compatible